

Guide de préparation de la caisse avant envoi à Steriswiss



- 1 -

Utilisation des instruments médicaux



- 2 -

Pré-désinfection des instruments médicaux (bain dans produit adéquat, dilution et temps de trempage selon mode d'emploi)



- 3 -

Rinçage à l'eau du robinet



- 4 -

Séchage (pour éviter la rouille)



- 5 -

Protection des instruments fragiles (soit silicone de protection fourni par Steriswiss, soit remise en emballage). Isoler les tout petits instruments dans une petite boîte



- 6 -

Rangement des instruments dans le sachet de protection fourni avec les instruments stériles



- 7 -

Placer le sachet dans la caisse de transport



- 8 -

Ajouter la fiche de transport (dans ou sur la caisse, voir ci-dessous)



- 9 -

Sceller la caisse avec les plombs rouges

Contacts

Tél : 022 734 36 00 • Email : info@steriswiss.ch
www.steriswiss.ch

Remplir la fiche de transport :

- Nombre de chaque instrument ou chaque set
- Commentaires notamment si instruments neufs (traitement spécial la première fois)
- Et impérativement : apposer nom et signature, et **préciser option de retour**

La qualité de notre service dépend également de la précision avec laquelle vous complétez cette fiche



Toute fiche mal complétée pourra engendrer des retards de retraitement, ou de livraison

» **Un doute sur le nom d'un instrument ou set ?** le nom est indiqué sur l'étiquette de l'emballage stérile

Placement de la fiche de transport :

- **Coursier Steriswiss :**
Sur la caisse,
et la fixer à l'aide
de la pince magnétique
- **Poste ou autre
coursier externe :**
dans la pochette
située à l'intérieur
du couvercle
de la caisse